


Vejledning i anvendelse af Dermafreezer

- Vurder hudlæsionens type og størrelse**
 - Behandl større læsioner (> 5 mm) i sektioner.
- Påfør antiseptisk behandling**
 - Reducér risikoen for infektion ved at anvende et passende antiseptisk middel.
- Bestem den bedste behandlingsmetode**
 - Ved vorter kan det være nødvendigt at påføre et keratolytisk middel før cryoterapi. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.
- Vælg og indsæt korrekt skumapplikator**
 - Brug enten 2 mm eller 5 mm skumapplikator og indsæt den i dispensereren.
- Klargør aerosolen**
 - Fjern beskyttelseshætten og aktiver dispensereren for at mætte skumapplikatoren med kryogen, indtil der kommer dråber fra applikatoren. Hold aerosolen lodret under denne proces og væk fra personer i nærheden.
- Hold aerosolen i en 90° vinkel**
 - Sørg for, at skumapplikatoren peger lodret nedad.
- Vent 15 sekunder**
 - Lad skumapplikatoren opnå den effektive temperatur.
- Påfør skumapplikatoren på hudlæsionen**
 - Påfør med let tryk i den anbefalede behandlingstid. Hold applikatoren lodret nedad under hele behandlingen.
- Gentag behandling om nødvendigt**
 - Gentag behandlingen op til 4 gange med 2 ugers mellemrum hvis det er nødvendigt.

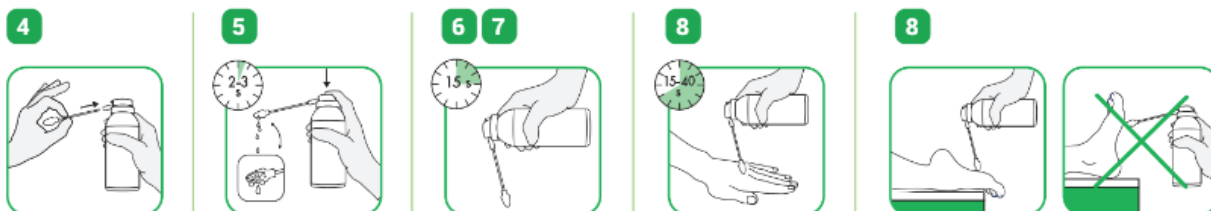

Type af hudlæsion	Anbefalet frysetid
Ano-genital vorter (Condyloma acuminatum)	40 sekunder
Molluscum Contagiosum	20 sekunder
Acrochordon (Hudlapper)	40 sekunder
Verruca plantaris	40 sekunder
Verruca vulgaris	40 sekunder
Verruca plana	20 sekunder
Seborrheic keratose	40 sekunder
Aktinisk keratose (ansigt)	15 sekunder
Aktinisk keratose (ikke ansigt)	40 sekunder
Lentigo (ansigt)	15 sekunder
Lentigo (ikke ansigt)	40 sekunder