

■ Mission® Cholesterol Monitoring System – Quick Guide (DK)

Kort vejledning til opsætning og måling

■ 1. Klargør apparatet

Indhold i kitted: Kolesterolmåler, teststrimler (CHOL / HDL / TRIG / 3-i-1), code chip, lanceringspen + sterile lancetter, kapillarrør, 4 × AAA-batterier og bære-etui.

■ 2. Sæt apparatet op første gang

A. Isæt batterier

1. Åbn batteridækslet bagpå apparatet.
2. Sæt 4 × AAA-batterier i – følg + / – markeringen.
3. Apparatet tænder automatisk.

B. Indstil systemet

Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 sekunder for at åbne opsætningsmenuen. Brug ■ ■ til at navigere og ■ (OK) for at vælge.

Indstilling	Beskrivelse	Handling
Enhed	Vælg måleenhed: mg/dL eller mmol/L	Vælg og tryk OK
Tidsformat	12-timers eller 24-timers ur	Vælg ønsket format
Datoformat	Y-M-D, M-D-Y eller D-M-Y	Vælg ønsket format
Dato og klokkeslæt	Indstil år → måned → dag → time → minut	Brug ■ ■
Lyd	Slå bip-lyd til/fra	ON / OFF
Prøvetype	bL = helblod (standard) / SE = serum/plasma	Vælg bL til fingerprik-test
CHD-funktion	Kun til professionelt brug	OFF ved selvtest

C. Isæt Code Chip

Sæt chippen fra teststrimmelæskan i apparatets slot og kontroller, at koden på displayet stemmer med teststrimmelpakken.

■ 3. Tag blodprøven

1. Vask og tør hænder grundigt.
2. Sæt ny lancet i lanceringspennen og indstil dybden.
3. Prik fingeren på siden af spidsen.
4. Fjern første dråbe blod, brug den anden.
5. Opsaml 10 µL (enkelttest) eller 35 µL (3-i-1 test).

■ 4. Udfør målingen

1. Tænd apparatet.
2. Indsæt teststrimlen i pilens retning.
3. Når bloddråbesymbolet blinker, påfør prøven midt på testfeltet.
4. Testen tager ca. 2 minutter.
5. Resultatet vises automatisk (CHOL, HDL, TRIG, LDL og CHOL/HDL).

■ 5. Efter brug

Kassér lancet og teststrimmel i egnet beholder. Rengør apparatet udvendigt med en let fugtig klud (ingen alkohol). Opbevar apparatet tørt i etuiet.

■ 6. Hurtig fejlfinding

Fejl	Årsag	Løsning
E-4	Batterier svage	Udskift batterier
E-5	For lidt blod	Gentag testen

---	Code chip mangler	Isæt korrekt chip
Temp fejl	Uden for 15–40 °C	Flyt apparatet til stuetemperatur

■ For fuld brugsanvisning henvises til den originale Mission® Cholesterol Manual (EN).